

## **RECEPTAL®** ULPA-Filter Für Den Rauchabzug

### Gebrauchsanweisung

**REF** iRF300-01  
**REF** iRF500

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Amsino ULPA-Filter für den Rauchabzug (iReceptal Surgical Smoke Evacuator ULPA Filter) (Filter) ist zum Gebrauch mit dem Amsino iReceptal mobilen Absauggerät oder dem Amsino iReceptal Mini mobilen Absauggerät bestimmt.

#### Anweisungen zur Filter installation

1. Überprüfen Sie alle Filter auf Transport- und Lagerungsschäden. Installieren Sie keine Filter mit sichtbaren Strukturschäden.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Unterseite des Filters.
3. Setzen Sie den Filter in das Filterfach des Rauchabsaugers ein. Stellen Sie sicher, dass der Filter vollständig an der Rückseite der Filterkammer anliegt.

#### WARNUNG

Das Gerät ist nicht zum Abpumpen von Flüssigkeiten vorgesehen. Wenn Flüssigkeit zum Filter gesaugt werden soll, müssen Flüssigkeitssammelvorrichtungen mit der Vakuumschlauchbaugruppe installiert werden. Wird kein Flüssigkeitsauffanggerät installiert, kann es zu einer Filterverstopfung und/oder elektrischen Schäden kommen.

#### Anweisungen zum Entfernen des Filters

1. Wenn der Filter erschöpft ist und ausgetauscht werden muss, schalten Sie das Rauchabsaugsystem aus und trennen Sie alle am Filter angeschlossenen Zubehörschläuche.
2. Ziehen Sie den Filter aus dem Rauchabzugssystem und entsorgen Sie ihn gemäß den Krankenhausrichtlinien. Der Filter kann entsorgt oder verbrannt werden.
3. Reinigungsanweisungen finden Sie im Systemhandbuch.

#### Warnungen

1. Ersetzen Sie diesen Filter gemäß der Systemanzeige. Nichtbeachtung des Filteraustauschs kann zu verringerter Effizienz, Kontamination des Elektromotors und des Schalldämmmaterials im System führen oder den Betrieb des OP-Rauchabsaugers unterbrechen.
2. Der gebrauchte ULPA-Ersatzfilter ist als biologisch kontaminiert zu betrachten und muss im mitgelieferten Biohazard-Beutel entsorgt werden.
3. Der ULPA-Filter und das zugehörige System dürfen nur von geschultem Personal ausgetauscht werden.

#### VORSICHT

Gemäß US-Bundesgesetz ist dieses Gerät ausschließlich für die Anwendung durch ein/eine Arzt/Ärztin oder auf seine/ihre Anordnung zugelassen. Blockieren Sie weder den Schlauch noch den Filter. Bei Verstopfung oder signifikanter Verengung kann der Vakuummotor überhitzen und das Gerät ausfallen.

**Haltbarkeitsdauer: 3 Jahre**



Amsino International, Inc.  
708 Corporate Center Drive  
Pomona, CA 91768, USA  
[www.amsino.com](http://www.amsino.com)



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



In China hergestellt

L11490 Rev.B DE